

gebruiksaanwijzing

EZ-Steunkouspistool®

HSK Hulpstuk



www.ezmd.nl

EZMD
EASY MEDICAL DEVICES

Woord vooraf

Het hulpstuk EZ-Steunkouspistool® - HSK (Halvering Schuif Kracht) is bedoeld als gereedschap om het opschuiven van de kous makkelijker te maken. Deze instructie is een aanvulling op de algemene gebruiksaanwijzing. Lees deze eerst zorgvuldig door.

Gebruiksaanwijzing HSK

1. Sluit de schelpen van het apparaat volledig
2. Trek een paar steunkous handschoenen aan




3. Steek de HSK adapter met het smalle gedeelte tussen de schelpen

4. Plaats de open zijde van de kous op de punt van de HSK. Zorg dat de hak van de kous richting het uiteinde van het Steunkouspistool gericht is.



5. Wrijf nu met de vlakke hand aan de zijkant van de HSK de kous naar beneden totdat de hak het rubber van de schelp bereikt heeft

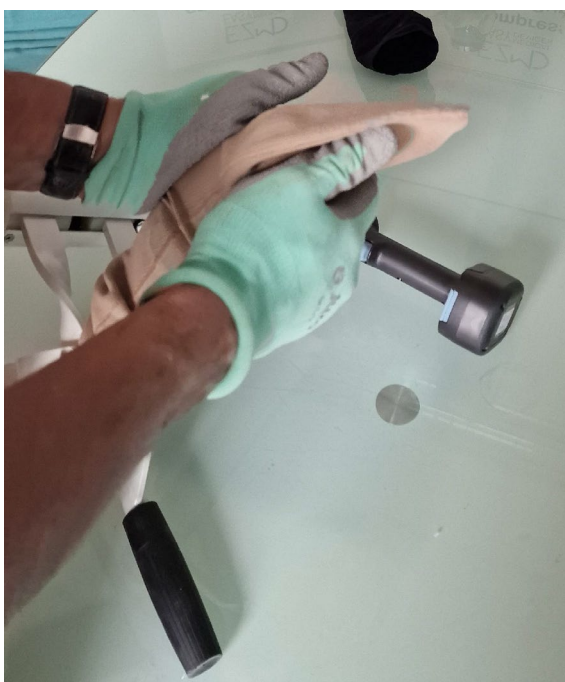

6. Span nu de kous op tot de juiste breedte. (zie algemene handleiding)
7. Pak de HSK door de opening van de kous en draai deze een kwartslag. U kunt de HSK er nu uithalen en wegleggen.



8. Nu kunt u de kous aantrekken zoals u gewend bent en tevens in de algemene handleiding beschreven staat.