

gebruiksaanwijzing

EZ-Steunkouspistool^{uit}



www.ezmd.nl

EZMD
EASY MEDICAL DEVICES

Disclaimer

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} mag alleen gebeuren wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing geheel kent en begrijpt.

Easy Medical Devices en haar moedermaatschappij Van de Werve BV nemen geen verantwoording voor foutief gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} noch voor het gebruik van een zichtbaar of voelbaar defect of incompleet EZ-Steunkouspistool^{®uit}

Gebruiksaanwijzing EZ-steunkouspistool[®]

Versie 6.1 / 12-06-2025

Inhoudsopgave

Onderdelen EZ-Steunkouspistool® - uit	6
Stappenplan: “Zelfstandig uw steunkousen uittrekken”	7
Extra optie: Voetsteun voor Steunkouspistool	11
Praktische tips	12
Onderhoud.....	13
Dagelijks onderhoud	13
Jaarlijks onderhoud	13
Losnemen van de accu.....	14
Garantie	15
Conformiteitsverklaring	16

Beste gebruiker van het EZ-Steunkouspistool® - uit,

In uw handen heeft u de gebruiksaanwijzing voor het uittrekken van uw steunkousen met behulp van het EZ-Steunkouspistool® - uit. In deze handleiding leggen we uit wat het EZ-Steunkouspistool® - uit is en hoe u het gebruikt om uw steunkous uit te trekken. Hier is een stappenplan voor, die wij zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk zullen bespreken. Hierdoor kan het uitgebreid lijken. Maar na enige oefeningen en het begrijpen en leren kennen van het apparaat en de handleiding zult u merken hoe eenvoudig dit gaat.

In de praktijk zijn het zes stappen die u moet onthouden:

- Uw voet plaatsen op het voetplateau
- De schelp naar boven bewegen
- De steunkous onderlangs om de schelp heen vouwen
- De schelp met de steunkous naar beneden bewegen
- Het EZ-Steunkouspistool® - uit van u weg duwen door middel van de wielen en uw knie buigen
- Uw voet uit de steunkous terug trekken

4

Daarnaast geven we u praktische tips, bespreken we het onderhoud van het hulpmiddel en leggen we uit hoe de garantie werkt. We sluiten af met onze conformiteitsverklaring.

Voordat u zelfstandig met het EZ-Steunkouspistool® - uit gaat werken, is volledige kennis van het EZ-Steunkouspistool® - uit belangrijk. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing goed.


- Zorg ervoor dat de schelp van het EZ-Steunkouspistool® - uit uw been zo min mogelijk raakt. U mag geen pijn of beschadiging ondervinden aan uw benen. Is dit toch het geval, dan voert u de handeling niet juist uit. Lees in dat geval de gebruiksaanwijzing (opnieuw) of vraag uw wederverkoper of ergotherapeut om uitleg.
- Zorg ervoor dat de schelp van het EZ-Steunkouspistool® - uit tot maximaal 5 centimeter tot uw knieholte reikt, niet verder.
- Zorg voor goed en tijdig onderhoud (zie pagina 9) volgens fabrieksvoorschrift door een Easy Medical Devices goedgekeurde onderhoudsdienst. En zorg dat uw EZ-Steunkouspistool® - uit niet nat wordt. Dit laatste kan kortsluiting veroorzaken en tot schade leiden.
- Behandel uw EZ-Steunkouspistool® - uit met beleid. Het (iets erop) laten vallen kan leiden tot beschadiging aan de schelp van het apparaat. Beschadigingen aan de schelp kunnen op hun beurt weer leiden tot beschadiging aan uw steunkousen.
- Voor vragen kunt u zich wenden aan uw wederverkoper, ergotherapeut of deze per e-mail stellen op customerservice@ezmd.nl

Onderdelen EZ-Steunkouspistool® - uit

Het uittrekken van steunkousen kan soms een uitdaging zijn. Maar hierbij komt ons innovatieve EZ-Steunkouspistool® - uit van pas. We bieden u hiermee een eenvoudige en efficiënte oplossing om steunkousen uit te trekken, waardoor u meer onafhankelijk bent en meer comfort ervaart in uw dagelijkse leven.

Het is een hulpmiddel dat is ontworpen om het uittrekken van uw steunkousen te vergemakkelijken. Hieronder beschrijven we alle onderdelen van het hulpmiddel door middel van een tekening, met nummers die de onderdelen aangeven.

- ① Plaats voor insteken van het oplaadapparaat
- ② Bedieningsschakelaar AAN/UIT
- ③ Keuzeschakelaar voor omhoog, omlaag en blokkeren pistool
- ④ Plaatsen van uw linkerhand
- ⑤ Plaatsen van uw rechterhand
- ⑥ Schelp
- ⑦ Voetplateau

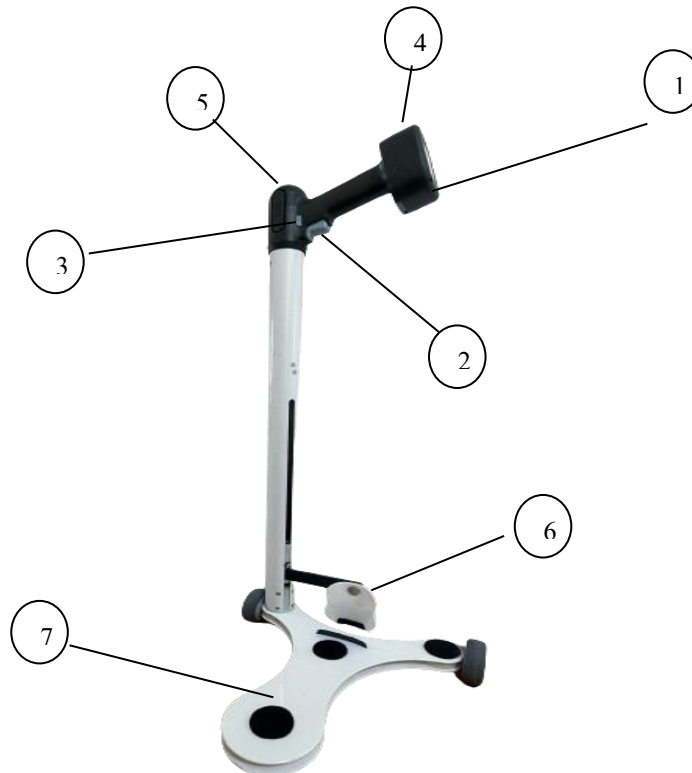

Stappenplan: “Zelfstandig uw steunkousen uittrekken”

Nu u op de hoogte bent van alle onderdelen van het EZ-Steunkouspistool® - uit en de werking ervan, kunt u beginnen met de onderstaande stappen voor het uittrekken van uw steunkousen.

Voor het uittrekken van uw steunkous heeft u nodig: het EZ-Steunkouspistool® - uit.

1. Neem plaats op een eetkamer-, of keukenstoel. Zorg voor een comfortabele zithouding en voldoende werkruimte om u heen.



Zorg dat uw been in een rechte hoek van ongeveer 90 graden staat.

2. Zet het EZ-Steunkouspistool® - uit tussen uw benen als u uw linker steunkous uit wil trekken. Plaats het EZ-Steunkouspistool® - uit rechts van uw rechterbeen als u uw rechter steunkous uit wil trekken.

3. Zet nu de voet van het been waar u de steunkous van uit wil trekken op het plateau.




8

4. Zorg dat uw hak niet tegen de schelp aan komt maar voor het rubber staat.



Nu kunt u de schelp naar boven brengen, waarbij de bovenkant van de schelp reikt tot aan de bovenste rand van uw steunkous.

5. Dit doet u door de schelp (6) omhoog te brengen. Zet hiervoor knop (3) in de goede beweegrichting. Aan de voorkant van het

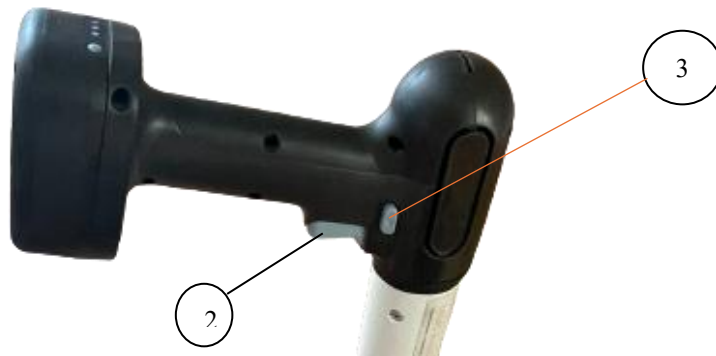

apparaat vindt u een knop met een pijltje naar boven. Deze drukt u in. Vervolgens drukt u op de grote knop (2) en beweegt u de schelp omhoog tot aan de bovenste rand van uw steunkous.

Als de schelp al omhoog staat, gaat u verder met stap 6.

Let op: staat de bedieningsschakelaar in het midden, dan is het hulpmiddel geblokkeerd.

Als de schelp zijn maximale laagte of hoogte heeft bereikt, stopt het hulpmiddel automatisch. Laat bedieningsschakelaar 2 dan ook los.

6. Nu gaat u uw steunkous om de schelp heen vouwen. Dit doet u door twee duimen aan weerszijden van uw steunkous aan de bovenkant in uw kous te schuiven. Beweeg de steunkous nu met behulp van uw duimen naar onderen, naar achteren en omhoog. De schelp moet tussen uw steunkous en uw been in komen. Zorg ervoor dat uw steunkous voor minstens 70% om de schelp heen zit.

7. Nu is het tijd om uw steunkous met behulp van het EZ-Steunkouspistool® - uit, uit te trekken. Zorg ervoor dat de schakelaar (3) op omlaag staat. Deze knop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Beweeg nu de schelp met uw kous eromheen met behulp van bedieningsschakelaar (2) naar beneden tot de schelp niet verder kan.



- 10
8. Laat bedieningsschakelaar (2) los zodra de schelp helemaal beneden is, anders blijft de motor lopen. Zodra de schelp helemaal beneden, of boven, is zal de beweging stoppen. Het apparaat maakt dan een licht ratelend geluid, ter indicatie dat het niet verder bewegen kan.
9. U gaat het EZ-Steunkouspistool® - uit nu kantelen. Dit doet u door uw linkerhand op (4) en uw rechterhand op (5) te leggen.



Kantel het apparaat naar u toe zodat het op zijn wielen komt te staan. Strek uw been en duw het EZ-Steunkouspistool® - uit naar voren. Trek tegelijkertijd uw voet terug zodat uw hak voorbij de bovenkant van de schelp is, en buig uw knie.

Buig uw tenen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk naar beneden en trek uw voet terug uit de steunkous. Uw steunkous gaat nu uit.

Extra optie: Voetsteun voor Steunkouspistool

Het Steunkouspistool® kan desgewenst worden uitgebreid met een voetsteun.

Deze extra optie biedt de mogelijkheid om, tijdens het uittrekken van de steunkous, het hulpmiddel met behulp van de voet(en) verder uit te duwen. De voetsteun is geen standaardaccessoire, maar kan optioneel op het Steunkouspistool® worden geïnstalleerd.

11



Praktische tips

- Bedenk bij alles: oefening baart kunst!
- Ga altijd op een hoge stoel zitten waarbij u uw voeten op de vloer kunt zetten. Werken vanuit de luie stoel is in dit geval veel vermoeiender dan even op bijvoorbeeld een eetkamer stoel te gaan zitten.
- Zorg altijd voor voldoende ruimte om u heen.

Onderhoud

Het EZ-steunkouspistool® - uit is een mechanisch hulpmiddel dat enig onderhoud vereist.

Dagelijks onderhoud

Controleer uw EZ-steunkouspistool® - uit dagelijks op beschadigingen en op scherpe randen aan de schelp. Scherpe randen aan de schelp kunnen leiden tot beschadigingen aan de steunkousen en moeten daarom altijd vermeden worden.

U kunt uw EZ-steunkouspistool® - uit reinigen met een zachte doek met een beetje zeep, allesreiniger, alcohol of keukenreiniger. Zorg dat het apparaat goed afgedroogd wordt na het reinigen en dat er inwendig geen resten van zeep of allesreiniger blijven zitten.

Jaarlijks onderhoud

13

Wij adviseren dat uw EZ-steunkouspistool® - uit gecontroleerd en onderhouden worden door Easy Medical Devices of een door Easy Medical Devices goedgekeurde gespecialiseerde onderhoudsdienst. Deze zal het apparaat op defecten controleren, eventuele beschadigingen aan de schelp verhelpen, het apparaat smeren en de aandrijving onderhouden.

Geadviseerd wordt om jaarlijks het apparaat te voorzien van een nieuwe schelp, met nieuwe rubbers, omdat deze tijdens gebruik slijten.

Voor dit reguliere onderhoud kunt u zich tot info@ezmd.nl.

Losnemen van de accu



Druk voor losnemen de blauwe knop op de accu in en schuif de accu van het apparaat. Terugzetten doet u door de accu op het apparaat te schuiven totdat deze vastklikt.

Voor het opladen van het EZ-steunkouspistool® - uit neemt u de accu los, en steekt u het kleine stekkertje in de laadpoort. Vervolgens steekt u de stekker in het stopcontact en let er op dat het witte lampje gaat branden. Dit lampje gaat continue branden zodra de accu opgeladen is.

Omdat er Lithium-Ion accu's worden gebruikt mag u de accu aan de lader laten zitten. Ook wanneer deze helemaal vol is. Bij normaal gebruik zult u minimaal 30 keer een steunkous uit kunnen trekken met een volle accu.

Door op de blauwe knop achter op de accu te drukken kunt u de laadtoestand controleren.

3 lampjes = volledig opgeladen, 1 lampje = bijna leeg.

Gebruik voor het opladen een USB lader met maximaal 3A laadstroom bij 5V. (De meegeleverde lader is 2,4A bij 5V).

Garantie

Op het EZ-steunkouspistool® geldt een garantie van twee jaar. De garantie vervalt bij het onjuist uitvoeren van het onderhoud en/of het onjuist gebruiken van het apparaat.

Slijtage aan de rubbers van de schelpen en de rubbers van het standaard is uitgesloten van garantie daar deze onderdelen een beperkte levensduur hebben door normale slijtage. Voor een goede werking wordt geadviseerd de schelpen met nieuwe rubbers ieder jaar te vervangen. Het is niet mogelijk de bestaande schelpen opnieuw van rubbers te voorzien.

Het apparaat dient voor garantie bij Easy Medical Devices aangeboden te worden.

Iedere poging zelf het apparaat te herstellen, uit elkaar te halen, te verbuigen, modificeren of anderszins te beschadigen doet de garantie vervallen.

Conformiteitsverklaring



CE Conformiteitsverklaring

CE Declaration of Conformity
CE-Konformitätserklärung
Declaration no. EZMD-20230918-001

Wij, We, Wir, Easy Medical Devices
Velperweg 114
6824 HM Arnhem
Netherlands

~~Verklaren dat het product, Declare that the product, erklären dass das Produkt,~~

Merk, Make, Marke, Easy Medical Devices

Type: EZ-Steunkouspistool^{ROn}, EZ-Compression Stocking Gun^{ROn},
~~EZ-Kompressionsstrumpfmaschine^{ROn}~~

Model, Modell, 1300.310 / 1301.310 / 1302.310

~~Inzetherik, Type of usage, Anwendungsbereich:~~

~~Steunkous aantrekhelp, Compression Stocking on aid, Kompressionsstrumpfmaschine~~

~~Capaciteit, Capacity, Kapazität~~

150mm; CC2-CC4 / 215mm; CC2-CC4 / 270mm; CC2-CC4

~~Een klasse 1 medisch hulpmiddel conform de volgende richtlijnen is, is a class1 medical device in conformity with the following directives, Ein medizinisch Hilfsmittel ist das die Forderungen folgender Europäischer Richtlinien erfüllt,~~

2017/745 MDR

Testrapport(en) VDW-20230918-001

Arnhem, 18-09-2023
L.R. van de Werve

Velperweg 114
6824 HM Arnhem
Nederland

Easy Medical Devices

WWW.EZMD.nl
Info@EZMD.nl
+31 (0) 26 206 0001

Handelsregister NL 32002405
IBAN NL 19 INGB 000576 77 83
BIC INGBNL2A