



Instructie

EZ-Steunkouspistool[®]
Voor verzorgenden

Woord vooraf

Het EZ-Steunkouspistool® voor verzorgenden is bedoeld als gereedschap voor zorgmedewerkers. Het is niet geschikt als hulpmiddel voor zelf aantrekken van kousen. Daarvoor heeft Easy Medical Devices andere speciaal ontwikkelde apparaten.

Deze instructie is deels samengesteld met behulp van foto's van een ouder model. Hoewel de werkwijze exact hetzelfde is kan dit mogelijk tot verwarring of onbegrip leiden. Mocht dit het geval zijn zoek dan direct hulp en ga niet experimenteren met een cliënt!

Let op de volgende aandachtspunten:

- Het model dat u gebruikt moet zijn gelabeld met modelnummer 1301.310.
- Het apparaat voor verzorgenden is niet voorzien van handgrepen.
- De schelpen zijn niet voorzien van rubbers
- Gebruik nooit een apparaat dat zichtbaar beschadigd of defect is!
- Laad het apparaat uitsluitend op met de bijgeleverde oplader (met oranje stekkertje)
- Deze instructie is een aanvulling op de bijgeleverde handleiding. Lees deze goed door.

Gebruiksaanwijzing met hulp van een verzorgende

1. Zorg voor een comfortabele zithouding zorgvrager en voldoende werkruimte rond de zorgvrager.
2. Zet de schelpen in de beginstand d.m.v. de bedieningsknoppen.



3. Leg het EZ-Steunkouspistool® voor je neer (op een tafel of op schoot) met de schelpen omhoog gericht.
4. Schuif de steunkous gelijkmatig tot de hak over de schelpen. Let hierbij op dat de steunkous niet is omgeslagen zodat de steunkous gelijkmatig van de schelpen af kan glijden. Zorg dat de hak netjes op de schelp ligt (zie foto) en dat het boord van de kous niet voorbij de uitsteeksels op de schelp komen

3



- Span de steunkous op zodat de voet door de opening kan. Hou daarbij met één hand de steunkous tegen zodat de hak van de steunkous op de vaste schelp ⑥ blijft zitten. Draai de schelpen zover uit elkaar dat de voet ertussen past en de schelp over de hak heen kan draaien. Ga niet verder dan strikt nodig.
Zodra deze stap gereed is hoeft u de aandrijving niet meer te gebruiken voor het aantrekken van de steunkous.



4

- Pak het EZ-Steunkouspistool® met de rechter hand bij de vaste schelp vast. Ondersteun met de schouder het EZ-Steunkouspistool® aan de bovenkant. Hou het EZ-Steunkouspistool® rechtop met de opening naar de voet van de zorgvrager. De linkerhand houdt u vrij voor de volgende stap.



7. Met de linker hand kunt u nu het been van de zorgvrager optillen en met de rechter hand het Steunkouspistool over de voet schuiven. Schuif nu de steunkous aan de voet totdat de tenen goed in de steunkous zitten en de hiel netjes in de hak van de steunkous zit.



8. Schuif het EZ-Steunkouspistool® voorzichtig over de hak en vervolgens langs het been naar boven. De steunkous zal geleidelijk van de schelpen afglijden.



9. Controleer of de steunkous goed zit.